


1. Ayarlar

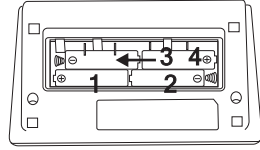

Pilleri Takın



Saati Ayarlayın



Başla

```
>>YIL      ████
>>AY       ████
>>GÜN      ████
>>SAAT     ████
>>DAKİKA   ████
>>SANIYE   ████
```




Yukarı
Aşağı



Giriş

2. Ölçüm

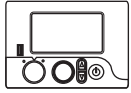


Cihazınızı
Açın



Fonksiyonunu
Seçin



Ölçüme
Hazır

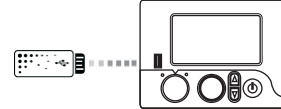

Cihazınıza USB
Belleğinizi Takın



Kolluğu Kolunuza
Uygun Şekilde Takın



Ölçüme
Başlayabilirsiniz

3. Yükleme



USB Belleği
Bilgisayara
Takınız



US USB
Bellek



Diğer
USB
Bellek



Dosyaları USB
Belleğe Kopyalayın

\\Driver\Framework_2.0_
Installation_Assistant.exe




Evet

Hayır

Fw2

Yükleyin

\\Driver\dotnetfx.exe

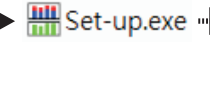


Set-up.exe
Uygulamasını
Çalıştırın



Kullanıcı
Klasörü
Ekleyin




Kullanıcı
Profili

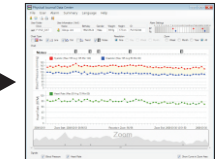

Tansiyon Takip
Merkezi

4. Başlangıç

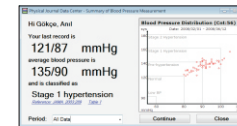

Otomatik Kullan